



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان جهرم  
(مدیریت تجهیزات پزشکی)


راهنمای استفاده از دستگاه

نام دستگاه : ساکشن صایران

مدل : medica c55

کد UMDNS : ۱۰۲۱۷

### راهنمای استفاده از کلیدها

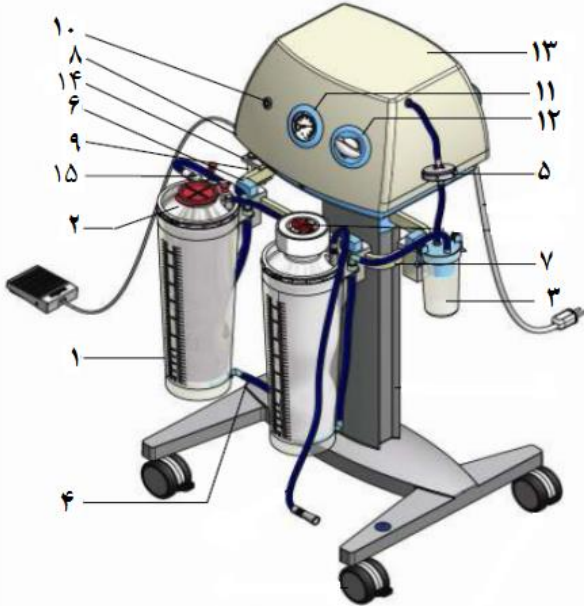

۱. جار ساکشن	۹. کلید اصلی
۲. درب جار ساکشن و مکانیزم شناور محافظ	۱۰. کلید Start/Stop
۳. جار محافظ	۱۱. گیج فشار
۴. شیلنگ ارتباطی محفظه ها	۱۲. تنظیم کننده مقدار خلاء
۵. فیلتر ضدباکتری	۱۳. الکترومپ ساکشن
۶. نگهدارنده جار یا محفظه	۱۴. نگهدارنده لوله سرساکشن
۷. ریل استند	۱۵. مانع سرریز
۸. کانکتور پدال	

### کاربری سریع دستگاه

۱. کابل برق را به پریز وصل کرده و کلید اصلی را روشن کنید. LED سبز رنگ کلید Push button روی دستگاه به حالت چشمک زدن در می آید.
۲. دکمه ON/OFF را فشار دهید. در این حالت LED سبز رنگ دائما روشن می ماند.
۳. میزان وکیوم را توسط پیچ تنظیم کننده، تنظیم نمایید.
۴. پس از کسب اطمینان از صحت اتصالات شیلنگ های رابط، جارها و فیلتر، لوله بیمار را وصل کنید. برای خاموش کردن دستگاه مجددا دکمه ON/OFF را فشار دهید که در این صورت LED سبز رنگ مجددا به حالت چشمک زدن در می آید.

### نکات نگهداشت

۱. جهت تمیز و ضد عفونی کردن، دستگاه را از برق شهر جدا کنید.
۲. کاور دستگاه و استند آن را می توان با استفاده از پارچه آغشته به مواد ضد عفونی کننده تمیز نمود.
۳. از به کار بردن وسایل تیز و برنده مانند چاقو یا کاردک جهت تمیز کردن دستگاه اکیدا خودداری فرمایید.
۴. قطعات جانبی شامل شیلنگ های سیلیکونی، جارها، درب جارها و شناور را می توان به یکی از دو روش زیر ضد عفونی کرد:  
الف- شستشو و ضد عفونی اتوماتیک  
ب- با استفاده از مواد شیمیایی ضد عفونی کننده
۵. استفاده از دستگاه بدون فیلتر ضد باکتری باعث انتشار بیماری های میکروبی و باکتریایی در محیط کار دستگاه می گردد.
۶. قبل از روشن نمودن دستگاه از قرار گرفتن شیشه ها در محل خود و محکم بودن درب آن ها اطمینان حاصل نمایید.
۷. رابط های مخصوص ساکشن را در محل خود نصب کنید

## کاربری دستگاه

### ✓ نکات قبل از استفاده:

نکته ۱: قبلا از استفاده مجدد از استریل بودن ملزومات زیر مطمئن شوید:

- شیلنگ های ورودی و متعلقات
- شیشه جمع آوری مایعات و متعلقات
- فیلتر باکتری و شیلنگ های مرتبط با آن

نکته ۲: قبل از هر بار استفاده فیلتر باکتری را چک کرده و در جایگاه خود قرار دهید (در صورت لزوم فیلتر تمیز و خشک گردد).

### ✓ نکات حین استفاده:

- ساکشن را روشن کنید
- شیلنگ های ساکشن را ببندید و مقدار مکش را تنظیم کنید.
- تمامی اتصالات ساکشن را به ساکشن متصل کنید.
- زمانیکه ساکشن در حال کار است به مقدار مایعات داخل شیشه توجه داشته باشید تا از  $\frac{2}{3}$  حجم بیشتر نشود.
- در صورت نیاز حتما شیشه ها را تخلیه نمایید.
- در صورت ورود هر نوع مایع به درون دستگاه، دستگاه را خاموش و از برق جدا کنید و با واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان تماس بگیرید.
- برای راه اندازی فقط و فقط در صورت بروز شرایط اضطراری (سرریز شدن مایع از جارها و ورود مایع درون دستگاه (دستگاه با آلامر متوالی صوتی متوقف می شود)، می توان کلید ON/STANDBY را برای مدت چند ثانیه نگه داشت تا دستگاه به کار خود ادامه دهد.

(نکته: این کار باعث آسیب جدی به دستگاه می شود، حتی المقدور از انجام این کار توسط خود اجتناب نمایید).

کد یکانه	تاریخ بازدید	تاریخ بازدید بعدی	بازدید کننده	نتیجه